

正面

yuwell

www.diabet-anytime.com

Комплектация

Сенсор

Зарядная станция

Трансмиссер

Зарядный кабель

Anytime

Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Серия CT3C

Краткое руководство пользователя

Шаг 1. Загрузите приложение.

Включите Bluetooth на мобильном устройстве.

Используйте камеру смартфона для сканирования QR-кода на упаковке, чтобы загрузить или обновить приложение.

Следуйте инструкциям по входу в систему.

Шаг 2. Зарядите трансмиттер.

Поместите трансмиттер в зарядную станцию. Белый индикатор начнет мигать (указывая на зарядку).

Подождите, пока индикатор не станет синим (указывая на полную зарядку), и извлеките трансмиттер.

Шаг 1. Подключитесь к трансмиттеру.

На странице «Подключить трансмиттер» приложения выберите серийный номер, соответствующий трансмиттеру, чтобы завершить подключение.

Шаг 2. Подключитесь к сенсору.

Откройте приложение, отсканируйте QR-код с наклейки на сенсоре и дождитесь начала обратного отсчета подготовки к работе.

Шаг 1

Выберите место для установки на животе — участок в пределах 5 см по диагонали выше пупка (в пределах пунтирной зоны, как показано на рисунке), избегая области ремня, шрамов и ребер.

Продезинфицируйте место установки спиртовой салфеткой и дайте коже высохнуть.

Шаг 2

Снимите две защитные пленки с оранжевой зоны.

Оторвите защитные пленки.

Шаг 3

Плотно прижмите сенсор к месту установки.

Шаг 4

Сдвиньте предохранитель, чтобы разблокировать замок.

Шаг 5

Нажмите кнопки с двух сторон одновременно, пока не услышите щелчок.

Шаг 6

Медленно извлеките вставочное устройство сенсора, чтобы завершить установку.

Шаг 1

Закрепите трансмиттер на сенсоре под углом, показанным на следующем рисунке.

Правильный метод размещения

Неправильный метод размещения

Шаг 2

Плотно сожмите трансмиттер и сенсор, как показано на следующем рисунке, пока не услышите щелчок.

Шаг 2

Нажмите на трансмиттер в обратном направлении, чтобы убедиться, что он разблокирован.

Шаг 1

Приложение начинает отображать значение уровня глюкозы в крови после завершения установки.

Шаг 2

Плотно сожмите трансмиттер и сенсор, как показано на следующем рисунке, пока не услышите щелчок.

Шаг 1

Медленно снимите целиком вместе с пластырем и устройством с места ношения.

После снятия потяните фиксатор вниз и сдвиньте трансмиттер, чтобы открыть его.

Утилизируйте сенсор как медицинские отходы.

Шаг 2

Нажмите на трансмиттер в обратном направлении, чтобы убедиться, что он разблокирован.

Шаг 3

После снятия потяните фиксатор вниз и сдвиньте трансмиттер, чтобы открыть его.

Шаг 4

Медленно извлеките вставочное устройство сенсора, чтобы завершить установку.

背面

图纸名称	CT3系列快速入门指南
语言版本	乌兹别克斯坦版-俄语
材质工艺	105g铜版纸
印刷颜色	四色印刷/专色印刷
外径尺寸	210x375mm
公差数值	±2mm

折叠方式
先竖折再横折 (竖1折 横4折)
折叠尺寸为75x105mm

名称	CT3系列快速入门指南(乌兹别克斯坦版)			材质: 105g铜版纸				
图纸编号	A4-CGM14-080			阶段标记	重量	比例		
设计者	A4-CGM14-080			日期	V1.0			
审核者				日期				
批准者				日期				
				共 1 页	第 1 页		物料编码	

技术要求 Q

参考《CT3系列快速入门指南通用采购质量标准》B2-CGM14-201

11/2024

